



FORMATO	CÓDIGO: PCC01
	VERSIÓN: 02
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO	PÁGINAS 1 DE 1

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2024DM-0029296

LÍNEA DE BIOSEGURIDAD MÉDICA ODONTOLÓGICA

OB PRO

DETERGENTE, DESINFECTANTE RAPIDO RTU

PRODUCTO PARA ÁREAS CRÍTICAS Y SEMICRÍTICAS HOSPITALARIAS

INDICACIONES:

Actúa como detergente y desinfectante en un solo paso, es ideal para desinfectar dispositivos y equipos biomédicos, también puede ser utilizado en todo tipo de áreas y superficies ya que es compatible con caucho, vidrio metales y superficies de granito, por su gran poder bactericida es ideal para la inactivación de residuos patógenos, con este producto evitamos el tener que usar diferentes tipos de desinfectantes en clínicas y hospitales simplificando la operación al momento de su manipulación.

Contiene amonios cuaternarios de quinta generación reforzados con alcohol etílico y enzima proteasa alcalina para obtener una gran concentración de principios activos y así lograr una rápida desinfección sin necesidad de enjuague.

Puede ser utilizado con confianza en todo tipo de superficies y equipos metálicos, ya que contiene un poderoso inhibidor de corrosión para evitar el pitting en los diferentes tipos de metales. La enzima proteasa digiere la capa proteica que envuelve las bacterias y virus exponiéndolas a la rápida acción de los detergentes catiónicos. Producto de rápida acción actúa en tan solo 1 minuto. Producto biodegradable no contiene colorantes artificiales, amigo del medio ambiente, no genera vapores ni olores peligrosos, económico de usar se puede re envasar en la presentación galón donde la norma lo permita.

APLICACIONES:

Producto ideal para la desinfección de equipos médicos y biomédicos, utilice en mesas, mesones, camillas, consultorios, áreas de urgencias, consulta médica y odontológica y todas las áreas críticas y se micríticas expuestas a contaminación cruzada entre pacientes.

La acción residual de los amonios incluidos en este producto puede durar hasta 48 horas en climas tropicales y adicional este producto ayuda a la prevención de hongos y moho en las superficies donde se utiliza.

MODO DE USO:

Humedezca un paño seco de acrílico o tipo wypall con el producto y limpie los dispositivos a desinfectar. NUNCA APLIQUE EL PRODUCTO SOBRE PANTALLAS LED, LCD O TÁCTILES.

Para desinfectar superficies duras aplique la solución con un aspersor o paño acrílico humedecido con el producto, deje actuar por espacio de 1 a dos minutos y NO enjuague para no perder la acción residual del producto.

ACTIVIDAD BACTERICIDA GRAM+ GRAM -

Este producto ofrece actividad desinfectante, llenando todos los requisitos hospitalarios, contra los siguientes organismos:

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, salmonella shottmuelleri, Salmonella Choleraesuis, streptococcus salvarious, Brevibacterium ammoniagenes, Stretococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes y Staphylococcus aureus, serratia marcescens, Bacillus subtilis.

ACTIVIDAD VIRUCIDA

Aplicado sobre superficies sólidas, ofrece actividad Virucida contra el VIH-1, Influenza A2/Japón (representativo del resfriado común), Herpes Simplex tipo 1 (causante de las ampollas de fiebre), Adenovirus tipo 2 (causante de infecciones respiratorias) y virus Vaccina (representativo de la viruela).

ACTIVIDAD FUNGICIDA

Para controlar hongos, levaduras y el moho en superficies duras aplique directamente deje actuar por dos minutos y limpie con paño húmedo.



OB PRO DETERGENTE DESINFECTANTE

INGREDIENTES ACTIVOS

Amonio cuaternario de quinta generación 10 %
Alcohol etílico 70% contenido 10% Edta tetrasodico, inhibidores de corrosión, colorantes artificiales.

CARACTERÍSTICAS

- Desinfectante de acción rápida, actúa en menos de (1) un minuto
- Producto con registro para dispositivos médicos
- NO contiene fragancia ni colorantes artificiales, amigable con el medio ambiente, no genera vapores, ni olores peligrosos
- Para uso en áreas críticas y se micríticas

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Producto económico de usar, la presentación de galón se puede reenvasar en el frasco dosificador incluido en las instituciones donde la norma lo permita.



GALÓN X 3.800 ML / incluye envase dosificador



750ML PISTOLA DOBLE ACCIÓN (ESPUMA Y SPRAY)

500ML CON VÁLVULA SPRAY

PRECAUCIONES GENERALES



Manténgase lejos del alcance de los niños.



No mezcle con otros productos de limpieza y desinfección.



Para información de seguridad consulte FDS del producto.