

GLUTARBIO

(GLUTARALDEHIDO AL 2% REFORZADO CON BTC)



Consulte en www.organicalab.com.co para más información acerca de estos productos

- 1. Vierta el contenido del producto en la cubeta plástica, se recomienda que el recipiente contenga tapa para así evitar contaminación externa de la solución.
- 2. Posteriormente añada la solución activadora al recipiente y revuelva hasta que el producto cambie de color.
- 3. Sumerja los instrumentos verificando que la solución quede cubriendo en su totalidad el instrumental.
- 4. Marque el recipiente o bitácora con la fecha de inicio de uso de la solución y así tener el control del tiempo de estabilidad del producto (25 a 30 días).
- 5. Tiempos de contacto para desinfección de alto nivel:
- 5.1 De instrumental semicrítico deje actuar el producto por espacio de 20 a 30 minutos.
- 5.2 Para esterilización en frío sumergir mínimo por espacio de 4 horas y así obtener una correcta eliminación de esporas y levaduras.
- 6. Para finalizar enjuague los instrumentos con agua potable o desmineralizada.

Se recomienda previamente al uso de este producto lavar bien el instrumental con *DETERGENTE PENTAENZIMATICO MARCA ORGÁNICA*.

Nota: para dar cumplimiento a protocolos internos institucionales y procesos de trazabilidad se recomienda el uso de las tiras de medición de actividad desinfectante del *GLUTARBIO*.

Además **NO** use este producto para desinfección de áreas y superficies y no deje el instrumental o material termosensible en inmersión por tiempos prolongados.

El color característico del producto sin activar es amarillo translúcido, posterior a la activación se torna de un color verde.

Formulación única en el mercado reforzada con amonios de quinta generación.












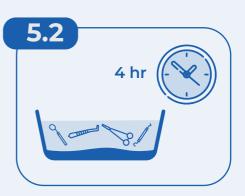







laborg_bio

Laboratorio Orgánica Biotech

